


КОСМЕТОЛОГИЯ

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ

Stormoff®

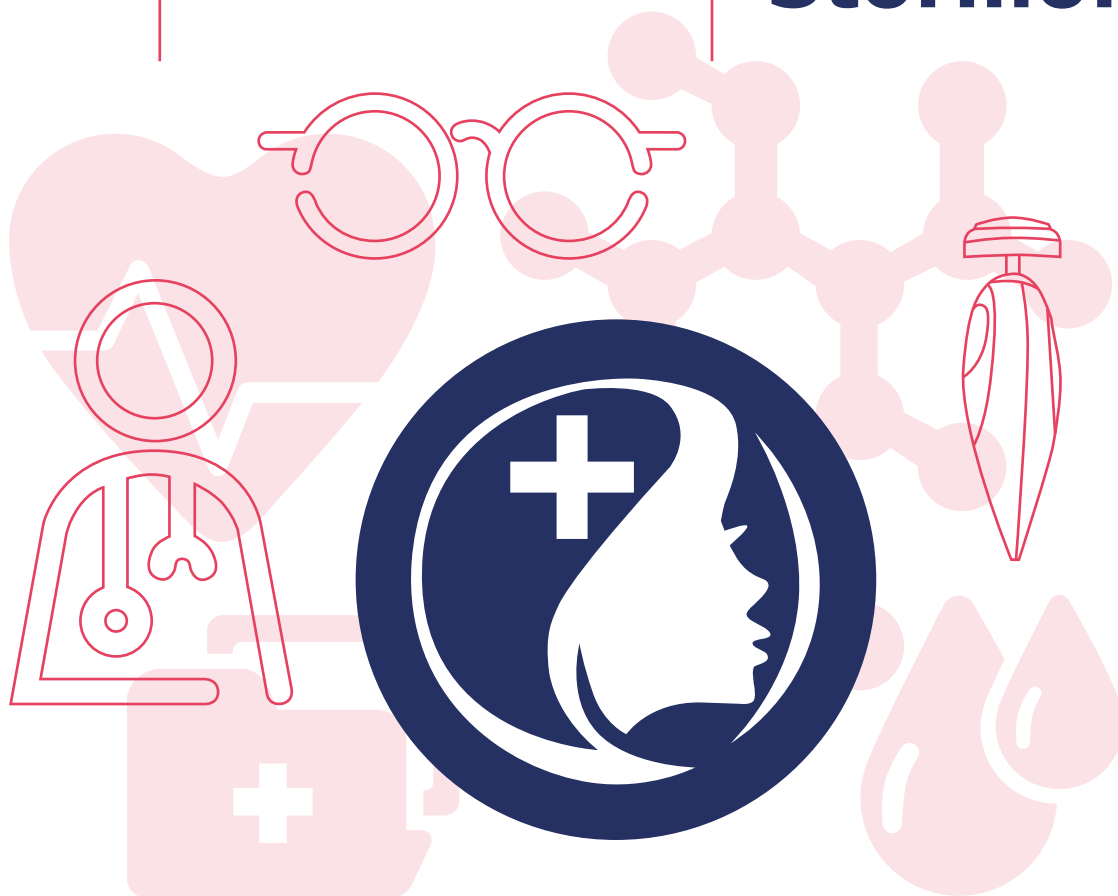

ДИЗАЙН АППАРАТОВ СЕРИИ XICIA	2
ДИЗАЙН АППАРАТОВ СЕРИИ BEAUTY CLINIC	3
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМБАЙНЫ ДЛЯ РАБОТЫ ПО ЛИЦУ	4
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ДЛЯ ЛИЦА	8
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОЦЕДУР ПО ЛИЦУ	9
АППАРАТЫ С RF-ЛИФТИНГОМ	10
АППАРАТЫ С МИОСТИМУЛЯЦИЕЙ	15
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ДЛЯ ТЕЛА	19
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОЦЕДУР ПО ТЕЛУ	20
АППАРАТЫ ДЛЯ ПРЕССОТЕРАПИИ	21
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ПРЕССОТЕРАПИИ	28
АППАРАТЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЭПИЛЯЦИИ	29
МЕТОДЫ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В КОСМЕТОЛОГИИ	31

Косметологические системы Technology, Италия

Серия Xilia



- Металлический фиксатор для крепления оборудования
- Колеса, вращающиеся на 360°
- Габариты 490 x 580 x 1180 мм

ДИЗАЙН АППАРАТОВ СЕРИИ XILIA

Экономичная серия аппаратов по уходу за лицом и телом для профессиональных косметологов.

Возможность крепления нескольких аппаратов на одну стойку (увеличение прибыли и экономия пространства)

- Держатели для аксессуаров
- Надежность и простота в эксплуатации и инсталляции



Пространство для выдвижного ящика



Держатели для аксессуаров



Пространство для полки или другого аппарата

Косметологические системы Technology, Италия

Серия Beauty Clinic



- Полки для косметики и аксессуаров
- Колеса, вращающиеся на 360°

ДИЗАЙН АППАРАТОВ СЕРИИ BEAUTY CLINIC

Экспертная серия аппаратов по уходу за лицом и телом для профессиональных косметологов.

*Возможность комбинирования методов
и расширенное количество программ*

- Удобное размещение аксессуаров
- Габариты 580 x 500 x 1150 мм



Сенсорный ЖК дисплей 10"



Ручка тележки



Откидной ящик для аксессуаров

Косметологический комбайн по лицу Technology, Италия

Xilia Face Lifting



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМБАЙНЫ
ДЛЯ РАБОТЫ ПО ЛИЦУ

Модель косметологического комбайна Xilia Face Lifting характеризуется продуманным набором функций, пользующихся наибольшей популярностью среди клиентов косметолога.

Десять встроенных функций

- **Определение влажности кожи:** мощность 8 Вт, постоянный ток 0,2 мА
- **Брашинг:** мощность 31 Вт, 315 об/мин, реверс
- **Абразивный пилинг:** количество типов насадок 4 шт, мощность 24 Вт, давление max. 30 см. рт.ст.
- **Ионофорез, дезинкрустация:** мощность 24 Вт, постоянный ток 4 мА
- **RF-лифтинг (биполярный):** частота тока 450 кГц
- **Воздушный массаж:** мощность 24 Вт, давление max. 15 см. рт. ст.
- **Микротоковый лифтинг:** I фаза – 400 Гц, II фаза – 250 Гц, III фаза – 100 Гц, IV фаза – 50 Гц; мощность 10,5 В; сила тока 1,4 мА/см² на электрод
- **Миостимуляция лицевым биполярным электродом:** мощность 40 Вт, импульсный ток 12 мА
- **Д'Арсонваль:** мощность 1 Вт, высокочастотный импульсный ток 0,1 мА, 10 КВ, 4 насадки



Определение влажности



Дезинкрустация, ионофорез



Воздушный массаж



RF-лифтинг



Микротоки



Абразивный пилинг



Миостимуляция



Д'Арсонваль

Косметологический комбайн по лицу Technology, Италия

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМБАЙНЫ
ДЛЯ РАБОТЫ ПО ЛИЦУ

Xilia System Face 4



Портативный косметологический комбайн
Xilia Face 4 – модель с компактными размерами
и отличной функциональностью.

*Аппарат позволяет качественно и удобно
проводить брашинг, воздушный массаж, процедуру
по методу Д`Арсонваль (четыре насадки),
дезинкрустацию, ионофорез*

- **Брашинг:** мощность 31 Вт, 315 об/мин, реверс
- **Ионофорез, дезинкрустация:** мощность 24 Вт, постоянный ток 4 мА

- **Воздушный массаж:** мощность 24 Вт, давление max. 15 см. рт. ст.
- **Д`Арсонваль:** мощность 1 Вт, высокочастотный импульсный ток max. 0,1 мА, 10 КВ



Брашинг



Дезинкрустация, ионофорез



Воздушный массаж



Д`Арсонваль

Косметологический комбайн по лицу Technology, Италия

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМБАЙНЫ
ДЛЯ РАБОТЫ ПО ЛИЦУ

Xilia Ultrasound Face

Аппарат для проведения УЗ-процедур по уходу
за лицом.



Включает в себя 14 различных программ по пилингу, депигментации, дезинкрустации, увлажнению, усилению микроциркуляции и тонизации, микромассажу и ионофорезу

- Процедуры выполняются с помощью ультразвука с частотой 25 кГц и 3 МГц
- Каждая из программ подразумевает три фазы проведения процедуры, которые подбираются в зависимости от возраста и типа кожи

- Механические колебания 30 микрон РР +/-20%
- Ток постоянный 4мА
- Дополнительные опции: стойка, полки, ящик



УЗ 26 кГц



УЗ 3 МГц



УЗ-манипула 3 МГц, УЗ-лопатка

Косметологический комбайн по лицу Technology, Италия

Face Beauty Clinic



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КОМБАЙНЫ
ДЛЯ РАБОТЫ ПО ЛИЦУ

Обновленная версия самого популярного многофункционального аппарата объединяет в себе все классические и инновационные методы по уходу и омоложению.

Двенадцать встроенных функций



Определение влажности



Вапоризация



Брашинг



Абразивный пилинг



УЗ-чистка



Дезинкрустация, ионофорез



Электропорация



RF-лифтинг



Микротоковый лифтинг



Миостимуляция



Д'Арсонваль



Воздушный массаж

ЖК-дисплей с визуализацией программ для лица Technology, Италия



- Диагональ дисплея 10"
- Сенсорный экран

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ДЛЯ ЛИЦА

Полное визуальное сопровождение всех процедур и программ.

Новейший интерфейс дисплея позволяет специалистам обеспечивать непрерывный визуальный контроль всех программ, данных пациента и параметров процедур

- Выбор программы
- Непрерывная индикация хода процедуры
- Быстрая регулировка параметров процедур



Непрерывная индикация хода процедуры



Определение типа кожи по фитцпатрику



Выбор программы

Аксессуары для процедур по лицу Technology, Италия



Манипула для брашинга



УЗ-манипула 3 МГц



Манипула для определения
влажности кожи



Д'Арсонваль



Насадки для брашинга



Манипула для воздушного массажа



Манипулы для микротокового лифтинга



Манипула биполярная и тетраполярная
для RF-лифтинга



Насадки для Д'Арсонваля



Колба для vaporizатора



УЗ-лопатка



Манипула для миостимуляции



Манипула для ионофореза



Манипула для абразивного пилинга



Насадки для абразивного пилинга

Аппарат радиочастотного лифтинга и липолиза Technology, Италия

Xilia Stim
RF-лифтинг



Инновационная система радиочастотной (RF) терапии для безоперационного лифтинга кожи лица и коррекции фигуры.

*Методы: радиочастотный лифтинг, RF-липолиз
с хромотерапией*

- Два наиболее безопасных метода воздействия радиочастотного тока: биполярный и тетраполярный
- Возможность создания индивидуальных программ
- Требования к электропитанию 220 В, 50 – 60 Гц
- Потребляемая мощность max.150 Вт

- LED (светодиоды) 380 – 700 нм
- Частота 450 кГц
- На стойке
- Дополнительные опции: полки, ящик



RF-манипула для лица
с хромотерапией тетраполярная



RF-манипула для лица
биполярная



RF-манипула для тела
с хромотерапией тетраполярная



RF-манипула для тела
биполярная

Аппарат радиочастотной терапии для коррекции лица и тела Technology, Италия

Body Beauty Clinic RF-лифтинг



Использование наиболее физиологичных мульти- и биполярных электродов позволяет говорить о полном отсутствии восстановительного периода после процедур.

Хромотерапевтический эффект обеспечивает стимуляцию и восстановление метаболизма, ускорение регенерации, противовоспалительное воздействие

- Методы: радиочастотный лифтинг, RF-липолиз с хромотерапией
- «Умная» RF-манипула оснащена датчиками температуры и движения: она автоматически отключается при остановке или превышении допустимой температуры, что дает возможность безопасной и эффективной работы на высокой мощности

- Жидкокристаллический цветной сенсорный дисплей 10"
- Карточки памяти для создания индивидуальных программ
- На тележке



Манипула для лица биполярная



Манипула для лица фракционная
мультиполярная



Манипула для тела с хромотерапией
мультиполярная

Косметологический комбайн
по телу и лицу
Technology, Италия

Body Beauty Clinic
RF-лифтинг
с миостимуляцией



В аппарате для безоперационной подтяжки
кожи и коррекции фигуры удачно воплощены
сочетанные методы: биполярный RF-лифтинг,
электролиполиз, миостимуляция, лимфодренаж.

*Омоложение, уменьшение глубины морщин,
уменьшение объемов тела, уменьшение видимых
проявлений целлюлита, подтяжка кожи лица
и тела, улучшение мышечного тонуса*

- 4 программы RF + электролиполиз
- 4 программы электролиполиза
- 12 программ RF + миостимуляция (для мужчин и для женщин)

- 12 программ миостимуляции (для мужчин и для женщин)
- 2 программы RF + лимфодренаж
- 4 программы лимфодренажа



RF-манипула для лица



Комбинированные биполярные
электроды



RF-манипула для тела

Косметологический комбайн
по телу и лицу
Technology, Италия

Body Beauty Clinic
Ultrasound
RF-лифтинг
с ВЧ ультразвуком



- Биполярная RF-манипула для лица
- Тетраполярная RF-манипула для лица
- Биполярная RF-манипула для тела
- Тетраполярная RF-манипула для тела

АППАРАТЫ С RF-ЛИФТИНГОМ

Производитель объединил в одном корпусе 2 аппарата, удачно сочетающих в себе новые методы для безоперационного лечения целлюлита и подтяжки кожи лица и тела: RF-лифтинг лица и тела, RF-липолиз, воздействие высокочастотным ультразвуком.

Омоложение, уменьшение глубины морщин, лечение целлюлита, улучшение качества и тургора кожи, улучшение формы тела

- УЗ манипула для тела 800 кГц диаметром 6 см и общей площадью рабочей поверхности 28 см²
- Мощность УЗ до 1,5 Вт/см²
- Максимальная суммарная мощность 42 Вт
- Частота тока 500 кГц



УЗ манипула для тела 800 кГц



RF-манипула для тела тетраполярная



RF-манипула для тела биполярная

Косметологический комбайн
по телу и лицу
Technology, Италия

Body Beauty Clinic
Ultrasound
RF-лифтинг
с кавитацией



- Биполярная RF-манипула для лица
- Тетраполярная RF-манипула для лица
- Биполярная RF-манипула для тела
- Тетраполярная RF-манипула для тела

АППАРАТЫ С RF-ЛИФТИНГОМ

Два новейших метода для безоперационного решения проблем избыточного веса и целлюлита: радиочастотный лифтинг, кавитация (воздействие низкочастотным ультразвуком).

Омоложение, уменьшение глубины морщин, локальное уменьшение объема тела, улучшение качества и тургора кожи, лечение целлюлита и локального ожирения, усиление микроциркуляции и лимфодренажа

- Частота УЗ 44 кГц
- Мощность УЗ до 2 Вт/см²
- Максимальная суммарная мощность 56 Вт
- Частота тока 500 кГц



УЗ-манипула для тела 800 кГц



RF-манипула для тела тетраполярная



RF-манипула для тела биполярная

Аппарат для моделирования фигуры Technology, Италия

Xilia Lipo



Три метода целенаправленного воздействия на мышцы и подкожно-жировую ткань: миостимуляция, лимфодренаж, электролиполиз.

18 предустановленных программ ухода за телом и лицом: 4 для электролиполиза, 8 для лимфодренажа, 5 для электромиостимуляции, программа для карт памяти

- 8 каналов для подключения 16 электродов
- Карты памяти предусматривают возможность записи создаваемых для клиентов персональных программ
- Схема наложения электродов на тело пациента отображается на ЖК-дисплее

- Выходная мощность max. 27 мА
- Частота тока от 2 до 198 Гц
- Дополнительные опции: стойка, полки, ящик, распределитель проводов



Аппарат для моделирования фигуры Technology, Италия

Xilia Lipo Infralight



Моделирование фигуры с использованием различных методик воздействия на мышцы и подкожно-жировую ткань.

24 встроенных программы: ИК-липолиз и электролиполиз, ИК-липолиз и миостимуляция, ИК-липолиз и лимфодренаж, электролиполиз, лимфодренаж, миостимуляция

- Диодное излучение инфракрасного диапазона проникает на глубину 5-6 см и способствует усилению метаболизма в подкожно-жировой клетчатке, которое активирует расщепление жиров липазами
- Влияние инфракрасного излучения дополняется электрическими волнами, тонизирующими мышцы и стимулирующими выведение метаболитов

- 16 электродов для электростимуляции
- 8 независимых комбинированных электродов для инфракрасного липолиза + токи
- Тканевой распределитель
- Инфракрасное излучение 70 мВт, 500 мКд
- Выходная мощность тока max. 27 мА
- Частота тока от 2 до 198 Гц



Аппарат для моделирования фигуры Technology, Италия

Xilia Lipo Ultrasound



Современный аппарат для коррекции фигуры обеспечивает использование ультразвука в сочетании с различными типами электрических волн.

Модель включает 24 программных режима работы, в том числе: электролиполиз, лимфодренаж, миостимуляция, ультразвук и электролиполиз, ультразвук и лимфодренаж, ультразвук и миостимуляция

- 16 электродов для проведения лимфодренажа и электролиполиза
- 8 независимых каналов для ультразвука
- Схема наложения электродов отображается на дисплее
- Индивидуально разработанные для каждого клиента программы сохраняются на карточках памяти, которые входят в комплект

- Для удобства хранения электродов предусмотрено специальное покрывало с карманами
- Выходная мощность тока max. 27 мА
- Частота УЗ 2 МГц
- Частота тока от 2 до 198 Гц



Аппарат для моделирования фигуры Technology, Италия

Body Beauty Clinic Infra & Stim



Аппарат для термомоделирования фигуры Body Beauty Clinic позволяет проводить программируемый термолифтинг и безоперационное лечение целлюлита на основе применения различных типов электроволн.


Эффективные технологии коррекции фигуры, позволяющие улучшить форму тела, сократить объемы и подтянуть кожу: электролиполиз, лимфодренаж, миостимуляция, ИК-терапия

- Инфракрасная терапия (16 режимов)
- Миостимуляция, электролиполиз, лимфодренаж в комбинациях (16 программ)
- Термолиполиз и электротерапия (16 режимов)
- Лечение 1, 2, 3 и 4 степеней целлюлита
- Программы для сокращения объемов рук, ног, бедер
- Режимы для стимулирования капиллярного кровотока
- Вазодилатация

- В комплекте с устройством предлагаются бандажи на руки, ноги, живот, ягодицы
- Помимо предустановленных алгоритмов, пользователь может собственноручно регулировать температуру в каждом бандаже
- Аппарат предусматривает 16 электродов для электротерапии, подключаемых с помощью 8 независимых каналов, а также 6 независимых каналов для инфракрасной терапии



ЖК-дисплей с визуализацией программ для тела Technology, Италия

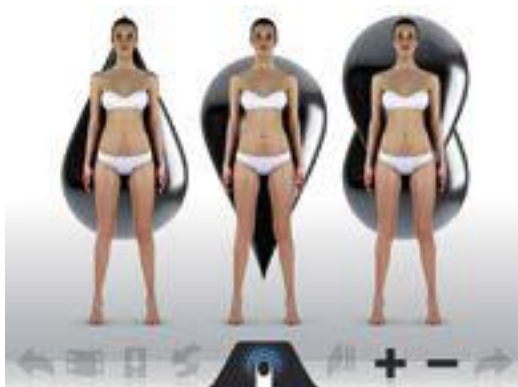

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ДЛЯ ТЕЛА

Полное визуальное сопровождение всех процедур и программ.

Новейший интерфейс дисплея позволяет специалистам обеспечивать непрерывный визуальный контроль всех программ, данных пациента и параметров процедур

- Диагональ дисплея 10"
- Сенсорный экран
- Отображение схемы наложения электродов

- Выбор программы в соответствии с морфологией пациента
- Непрерывная индикация хода процедуры
- Экран настроек параметров процедуры



Непрерывная индикация хода процедуры



Экран настроек параметров процедуры



Отображение схемы наложения электродов

Аксессуары для процедур по телу Technology, Италия



Комбинированная манипула ток + RF



Комбинированная манипула ток + УЗ



Комбинированная манипула ток + ИК



Токопроводящие электроды

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОЦЕДУР ПО ТЕЛУ



УЗ-манипула



Биполярная RF-манипула



Тетраполярная RF-манипула



ИК-манжеты

Аппарат для прессотерапии Technology, Италия

Body Beauty Clinic



- Количество каналов – 12
- Многоканальность: конструктивно каналы разветвляются на секции, обеспечивая перекрытие всех зон с возможностью варьирования последовательности надува секций
- Цветной Touch screen дисплей 10" с визуализацией программ
- Раздельная регулировка давления для рук и ног, эффект «волны»



Костюм на все тело для 12-канального аппарата
прессотерапии

АППАРАТЫ ДЛЯ ПРЕССОТЕРАПИИ

Аппарат для лечения и профилактики венозной недостаточности, проведения процедур реабилитации в травматологии, ортопедии, косметологии, реконструктивной хирургии и терапии на основе импульсной баротерапии.

Уникальная возможность одновременного проведения лимфодренажной программы для всего тела

- **Инновационный режим PULSE MESSAGE**, который обеспечивает форсированный лимфодренаж и рефлекторную стимуляцию артерио-венозного кровообращения
- Манжеты для ног имеют раздельное строение для регулировки по росту: сапожок, голень-бедро, паховая секция, живот-поясница
- Манжеты для рук позволяют проводить лимфодренаж, начиная с подмышечных лимфоузлов (подмышечная секция, рукав, рукавичка)



Удобные карманы для хранения манжет

Аппарат для прессотерапии Technology, Италия

Body Beauty Clinic с миостимуляцией



- Количество каналов - 12
- Предусмотрен режим ионофореза
- Малошумный мотор нового поколения
- Широкие манжеты подходят для полных пациентов и имеют дополнительные фиксирующие ремни



Отстегивающаяся моющаяся внутренняя подкладка

АППАРАТЫ ДЛЯ ПРЕССОТЕРАПИИ

Две технологии в одной процедуре одновременно:
прессотерапия + миостимуляция.

Электрод-лента обеспечивает равномерное распределение импульсов по телу, а манжеты для прессотерапии – плотное прилегание электродов

- Возможность одновременного и отдельного проведения программы лимфодренажа и миостимуляции для всего тела
- Предварительный просмотр последовательности программы на дисплее



Удобные карманы для хранения манжет

Аппарат для прессотерапии Technology, Италия

Body Beauty Clinic с миостимуляцией и термотерапией



- Количество каналов – 12
- Создание индивидуальных программ
- Раздельные манжеты для регулировки по росту (32 сектора)

АППАРАТЫ ДЛЯ ПРЕССОТЕРАПИИ

Три технологии в одном аппарате.
Две технологии в одной процедуре одновременно:
прессотерапия + миостимуляция;
прессотерапия + термотерапия.

*Тепло оказывает приятное, расслабляющее
воздействие, усиливает микроциркуляцию
с последующим улучшением внутритканевого
обмена веществ, в том числе расщепления жиров*

- Удобное покрывало с карманами для хранения манжет
- Безопасность контролируется микропроцессором, при превышении давления на 10 мм рт.ст. производится немедленное отключение оборудования на 5 секунд



Одевание электродов и костюма
для прессотерапии



Доступ к внутренним секторам



Заменяемые надувные силиконовые
секторы

Аппараты для прессотерапии Technology, Италия

Xilia Digital Press/ Xilia Press



- Количество каналов – 8
- Регулировка давления и эффект «волны»
- Сенсорный дисплей с визуализацией программ 8"/5,6"



Аппарат для прессотерапии Xilia Press

АППАРАТЫ ДЛЯ ПРЕССОТЕРАПИИ

Аппарат с набором наиболее востребованных программ, обеспечивающий классический лимфодренаж.

Xilia Digital Press: 12 программ (8 для ног и 4 для рук)
Xilia Press: 8 программ (6 для ног и 2 для рук)

- Предварительный просмотр программ
- Манжеты на нижнюю часть тела с регулировкой по росту (20 секторов)
- Покрывало с карманами для манжет



Костюм для 8-канального аппарата прессотерапии

Аппараты для прессотерапии Tecnology, Италия

АППАРАТЫ ДЛЯ ПРЕССОТЕРАПИИ

	BODY BEAUTY CLINIC с миостимуляцией и термотерапией	BODY BEAUTY CLINIC с миостимуляцией	BODY BEAUTY CLINIC	XILIA DIGITAL PRESS	XILIA PRESS
Цветной сенсорный дисплей	10"	10"	10"	8"	5,6"
Прессотерапия	•	•	•	•	•
Импульсная прессотерапия	•	•	•		
Прессотерапия и миостимуляция	•	•			
Прессотерапия и термотерапия	•				
Запрограммированные протоколы	84	66	22	12	8
Создание индивидуальных программ	•	•	•	•	
Программы проверки секторов	•	•	•	•	•
Число каналов	12	12	12	8	8
Установка давления, mmHg	30-120	30-120	30-120	30-120	30-120
Регулировка каждого канала	•	•	•	•	
Стандартные аксессуары	Манжеты на все тело (32 сектора), лента-электрод, термоманжеты	Манжеты на все тело (32 сектора), лента-электрод	Манжеты на все тело (32 сектора)	Манжеты на нижнюю часть тела (20 секторов)	Манжеты на нижнюю часть тела (20 секторов)
Потребляемая мощность (max), Вт	180	180	90	60	60
Габариты, см	58 x 50 x 115	58 x 50 x 115	58 x 50 x 115	60 x 50 x 120	40 x 35 x 15
Вес, кг	35	35	35	11	8
Манжеты для рук (12 секторов)	•	•	•	○	○
Покрывало	•	•	•	•	•
Тележка	•	•	•	•	○

○ - опция

Подготовка к процедуре моделирования фигуры на аппарате для прессотерапии и миостимуляции



1. Обернуть влажные текстильные бандаж



3. Закрепить ленты-электроды в области живота



5. Подключить электроды



2. Обернуть ленты-электроды для миостимуляции



4. Одеть полиэтиленовые брюки



6. Одеть костюм

Последовательность одевания костюма для прессотерапии



1. Одеть и зафиксировать манжеты «сапожок»



2. Одеть манжеты на голень и бедро



3. Зафиксировать манжеты ремнями



4. Одеть тазовую манжету с паховыми зонами



5. Закрепить тазовую манжету на «липучку»



6. Зафиксировать тазовую манжету ремнем



7. Одеть и закрепить манжеты «рукавичка»



8. Одеть и закрепить манжеты для рук



9. Зафиксировать манжеты для рук

ЖК-дисплей с визуализацией программ Technology, Италия



- Диагональ дисплея 10"
- Сенсорный экран
- Выбор программы
- Схема наложения бандажей

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММ ПРЕССОТЕРАПИИ

Полное визуальное сопровождение всех процедур и программ.

Новейший интерфейс дисплея позволяет специалистам обеспечивать непрерывный визуальный контроль всех программ, данных пациента и параметров процедур

- Экран настроек параметров процедуры
- Схема наложения резиновых лент-электродов для миостимуляции



Схема наложения бандажей



Экран настроек параметров процедуры



Схема наложения резиновых лент-электродов для миостимуляции

Аппарат для электроэпиляции Technology, Италия

Xilia Epil 5



Аппарат удачно сочетает в себе пять классических, оптимально подобранных методов электроэпиляции: Термолиз, Электролиз, Blend, Super Flash и Super Flash 3.

Комбинированное применение позволит Вам подобрать нужный метод, в зависимости от обрабатываемой зоны, структуры и глубины расположения фолликулов, густоты роста волос

- **Blend:** грубые, редко растущие, толстые волосы
- **Высокочастотный термолиз:** густые, толстые волосы
- **Super Flash:** чувствительные области, тонкие волосы
- **Super Flash 3:** трудноудаляемые или «упрямые», густые волосы, большие зоны, чувствительные зоны, бикини
- **Электролиз:** деформированные и изогнутые волосы

- Требования к электропитанию 230 В, 50 – 60 Гц
- Потребляемая мощность 60 Вт
- Рабочая частота 3,39 МГц
- Выходная мощность max. 20 Вт



Игла



Держатель иглы с подсветкой



Полярный электрод с кабелем

Аппарат для электроэпиляции Technology, Италия

Xilia Epil 7



Аппарат сочетает в себе семь популярных и эффективных методов. Шесть для эффективного удаления волос: Термолиз, Пинцет, Электролиз, Blend, Super Flash и Super Flash 3 и один для ухода после процедур: Derm.

Система «SENSE» – режим автоматической работы без педали. При достижении иглой корня волоса, испускается электрический импульс, раздается звуковой сигнал, и на дисплее отображается результат

- **Пинцет:** труднодоступные волосы
- **Derm:** метод ухода до и после эпиляции. Анафорез – увеличивает проникновение в кожу анестетиков, биологически активных веществ и средств для уменьшения роста волос. Катафорез – снимает отечность и гиперемию после процедуры

- Потребляемая мощность 60 Вт
- Рабочая частота 3,39 МГц
- Выходная мощность max. 20 Вт



Закрепляющая лента




Пинцет



Насадка Derm для ухода до и после эпиляции

Методы терапевтического воздействия в косметологии

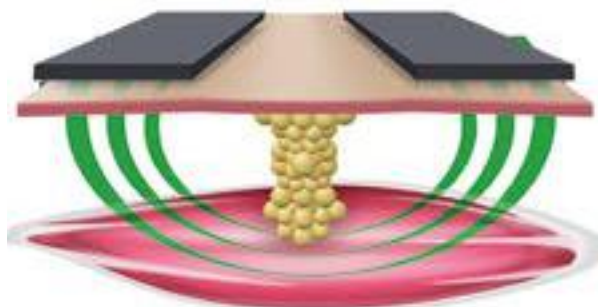

СПРАВОЧНИК

Инфракрасная терапия (липолитическое действие)

Диодное излучение инфракрасного диапазона, достигая подкожно-жировой клетчатки, увеличивает её температуру и усиливает активность ферментов, что способствует местному липолизу. Триглицериды расщепляются на жирные кислоты и глицерин, которые поступают в межклеточное пространство и кровоток, затем метаболизируются и становятся источником энергии для мышечных сокращений.


Электролиполиз (лечение целлюлита/лечение ожирения)

Электролиполиз способствует увеличению клеточной активности, ускоряет кровообращение, способствует клеточному обмену веществ и локальному сжиганию жиров. Синергичное действие этих эффектов необходимо для комплексного воздействия на области целлюлита, где накапливается жир в адипоцитах, и нарушена микроциркуляция: ягодицы, живот, бедра, колени.

Миостимуляция (тонизирующий эффект)

Электростимуляция избирательно действует на группы мышц, моделирует фигуру в требуемых областях. Миостимуляция вызывает сокращение мышц, главным образом, с участием красных мышечных волокон, которые используют жирные кислоты, чтобы получить энергию для сокращения. Жирные кислоты метаболизируются в энергию, углекислый газ и воду. Жиры, вышедшие в кровоток и межклеточную жидкость после применения других методов лечения, потребляются и не накапливаются обратно в адипоцитах.

Методы терапевтического воздействия в косметологии

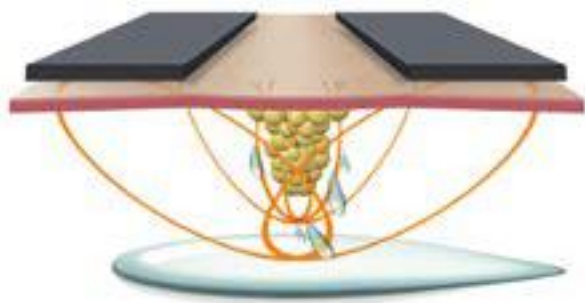

Лимфодренаж (противоотечное действие)

Токовый лимфодренаж осуществляется благодаря последовательному расположению электродов и сочетанию стимулирующих токов, которые оказывают тонизирующее и дренажное действие, повышают эластичность мышц и тканей, облегчают выведение избыточной жидкости и продуктов метаболизма. Новая форма волны, разработанная лабораторией Overline завода Technology, делает процедуру лимфодренажа эффективной и приятной.



Ультразвуковая терапия 800 кГц - 2 МГц (лечение целлюлита)

Ультразвук проникает на глубину 5-6 см и разрушает фиброзно-склеротический каркас, окружающий целлюлитные клетки, способствует повышению локальной температуры и увеличению скорости метаболических реакций. Таким образом, увеличивается скорость липолиза, изменяется проницаемость клеточных мембран и осуществляется микромассаж клетки.




Действующие совместно четыре ультразвуковые головки фокусируют ультразвук в центре подкожно-жировой ткани и дают более выраженный и быстрый эффект при более низкой мощности.



Кавитация. Ультразвуковая терапия 28 - 44 кГц (лечение локального ожирения)

Эффект кавитации в жировых клетках достигается при помощи воздействия мощного низкочастотного ультразвука 28-44 кГц. Кавитация разрушает жировые клетки, при этом триглицериды поступают в интерстициальное пространство, а затем элиминируются из организма через лимфатическую и венозную систему. Данная технология обеспечивает быстрый и пролонгированный результат и может по праву называться безоперационной липосакцией. Совместно действующие четыре ультразвуковые головки фокусируют ультразвук в центре подкожно-жировой ткани и дают более выраженный и быстрый эффект при более низкой мощности.

Методы терапевтического воздействия в косметологии

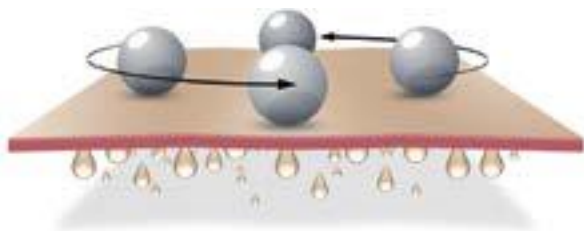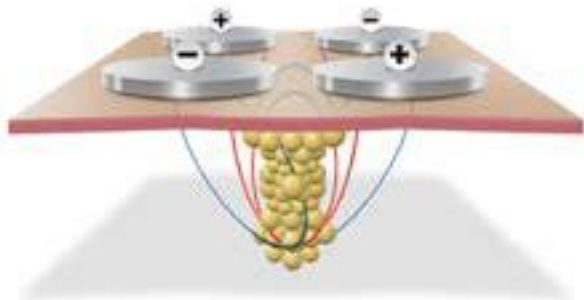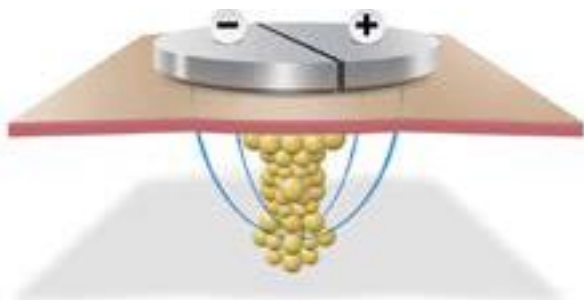

Биполярная радиочастотная электротерапия (RF-лифтинг)

Терапия основана на тепловом эффекте, возникающем при прохождении тока через ткани. При увеличении температуры под кожей происходит денатурация поврежденных белков коллагена, которые сжимаются и утолщаются – эффект лифтинга, что приводит к увеличению плотности дермы. Термический импульс также активирует фибробласты с последующим увеличением синтеза коллагена, эластина и, следовательно, приводит к увеличению плотности кожи, создавая запас эластичности тканей на длительное время. Другой важный эффект радиочастотной электротерапии оказывает на жировую ткань. В частности, липолитический эффект на адипоциты, приводящий к расщеплению триглицеридов.



Мультиполярная радиочастотная электротерапия (RF-лифтинг/термолиполиз)

Наилучшим способом доставить энергию под кожу является инновационный метод, объединивший лучшие характеристики монополярной и биполярной электротерапии. Одно из преимуществ метода это фокусировка энергии в одной точке через систему четырех полюсов. Таким образом, может быть получено повышение температуры как на поверхности (40°C), так и в более глубоких слоях (43°C до 2 см в глубину). За счет перекрещивания импульсов мультиполярная манипула позволяет работать на более низкой мощности, и специалист может проводить более длительные процедуры. Процедура вызывает небольшое и комфортное ощущение тепла.

Электropорация (введение активных препаратов)

Электropорация кожи возникает, когда в эпителиальной клетке с помощью индукции электрического импульса формируются специальные временные изменения мембраны (клеточной стенки) с образованием «водных каналов», их также называют «электropоры». Формирование этих электropор происходит на короткое время после действия индукции электрического импульса, что позволяет молекулам активных веществ проходить в клетку. С помощью этого метода совершенно безболезненно и неинвазивно можно ввести в глубину вещества, выбранные для решения определенных эстетических проблем, даже с достаточно большой молекулярной массой.

Методы терапевтического воздействия в косметологии

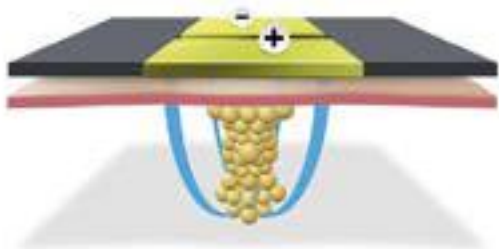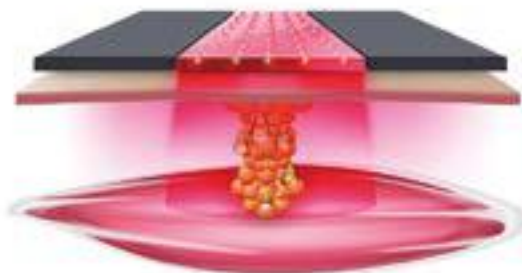

СПРАВОЧНИК

Сочетанное воздействие

Многочисленные исследования и наблюдения показали, что совместное действие инфракрасных лучей/ультразвука/ RF-терапии и электролиполиза даёт гораздо больший эффект, чем комбинация отдельных процедур.

Инфракрасная и электротерапия

Ультразвуковая и электротерапия

RF-радиочастотная и классическая электротерапия

Методы терапевтического воздействия в косметологии



СПРАВОЧНИК

Определение влажности кожи (диагностика)

Диагностический метод, основанный на измерении относительного количества жидкости в коже путем определения разницы сопротивления тканей при прохождении электрического тока. Позволяет измерить степень гидратации тканей, назначить необходимые процедуры и оценить эффективность лечения.



Вапоризация (распаривающий эффект)

Процедура с использованием направленной тонкой струи пара является наиболее естественным способом, чтобы расширить поры, облегчить удаление поверхностных загрязнений и стимулировать кровообращение. Она представляет собой стандартный начальный этап для любой эстетической процедуры. Аппарат Face Beauty Clinic (Technology) оснащен распаривателем с направленной струей пара в сочетании с лампой-ионизатором и возможностью использования эфирных масел.



Брашинг (отшелушивающее действие)

С помощью брашинга выполняется глубокая очистка лица с использованием специальных щеток – пилинг, при котором отшелушивается поверхностная часть рогового слоя эпидермиса, удаляются загрязнения. Пилинг подготавливает область, на которой будут проводиться последующие процедуры, для наилучшего воздействия лечебных методов и увеличивает проникновение активных ингредиентов. Глубокое очищающее действие полезно как для подготовки кожи для других процедур, так и просто для массажа и восстановления ее красоты.

Методы терапевтического воздействия в косметологии



Абразивный пилинг (отшелушивающее действие)

Абразивный пилинг – метод воздействия на кожу специальной насадкой с шероховатой поверхностью в сочетании с действием вакуума. В результате происходит отшелушивание рогового слоя эпидермиса. Метод эффективен при гиперкератозе, постакне, вросших волосах, а также в комплексной терапии гиперпигментаций, рубцов и возрастных изменений на коже.



Ультразвук 25-28 кГц (очищение, массаж и глубокое проникновение активных ингредиентов)

Под действием ультразвуковой чистки происходит механическое отшелушивание рогового слоя эпидермиса, очищение пор, улучшение микроциркуляции и метаболизма в тканях. Ультразвуковой массаж в сочетании с введением косметических средств обеспечивает глубокое проникновение активных компонентов в кожу. Многообразие специализированных программ позволяет эффективно воздействовать на различные типы кожи и устранять разнообразные проблемы.



Эндодермальный воздушный массаж (дренажный эффект)

Воздушный массаж кожи стимулирует кожные рецепторы, улучшает микроциркуляцию и лимфоотток. В результате воздействия уменьшается отечность лица, улучшается цвет и тонус кожи, происходит видимая коррекция возрастных изменений, уходят признаки усталости. Кроме того, данный вид воздушного массажа не растягивает кожу лица.

Методы терапевтического воздействия в косметологии



СПРАВОЧНИК

Микротоковый лифтинг (омолаживающее действие)

Метод основан на воздействии низкочастотного тока малой величины, не вызывающего сокращения мышц. В результате происходит улучшение кровообращения и внутриклеточного обмена, стимуляция лимфооттока и увеличение тонуса мышц. Метод оказывает ревитализирующий эффект, стимулирует фибробласты и повышает количество и качество коллагена. Микротоковая терапия показана для коррекции дряблой увядающей кожи, жирной кожи, а также реабилитации после пластических операций, химических пилингов и микродермабразии. Микротоковый лифтинг состоит из четырех этапов лечения с использованием 4-х различных видов тока.

Хромотерапия (балансирующий эффект)

Хромотерапия рассматривает эстетические проблемы как дисгармоничные вибрации клеток определенной области тела, которые могут быть сбалансированы за счет использования энергии света определенного или нескольких спектральных цветов.

Ультразвук 3 МГц (омолаживающее действие и глубокое

проникновение активных ингредиентов)
Вибрационный массаж тканей под действием ВЧ-ультразвука стимулирует обменные процессы на клеточном уровне, запускает биохимические и ферментативные реакции, повышает проницаемость цитоплазматических мембран, активирует движение интерстициальной жидкости. Выделяемое УЗ-манипулой тепло вызывает расширение сосудов и повышает активность обменных процессов между сосудистым руслом и межклеточным пространством: уменьшается отечность, улучшается цвет лица, повышается тонус тканей. Ультразвук данной частоты стимулирует синтез коллагена и эластина, происходит профилактика образования келоидных рубцов. Метод используется для пенетрации активных ингредиентов в глубокие слои кожи (фонофорез).

Методы терапевтического воздействия в косметологии



Миостимуляция (стимулирующее действие)

Стимуляция лицевых мышц улучшает кровообращение в мышцах и коже, стимулирует обменные процессы, мягко повышает тонус расслабленных мышц лица, что приводит к выраженному лифтинг-эффекту. Рекомендуется в качестве превентивной меры молодым пациентам.



Д'Арсонваль (антибактериальный эффект)

Дарсонвализация или терапия высокочастотным электрическим током стимулирует местный кровоток, улучшает трофику и оксигенацию тканей, повышает местный иммунитет и оказывает бактерицидный эффект. Метод используется для лечения угревой болезни, алопеции и коррекции возрастных изменений.



Гальванический ток (дезинкрустация и ионофорез)

Это физиотерапевтический метод с использованием постоянного тока малой силы. Гальванотерапия стимулирует местный кровоток и лимфоотток, улучшает обмен веществ, оказывает тонизирующее воздействие, повышает местный иммунитет.

Ионофорез – введение активных ингредиентов косметических средств с определенным зарядом ионов в глубокие слои кожи, в результате в коже образуется депо лекарственного вещества, которое постепенно диффундирует в ткани.

Дезинкрустация – глубокое очищение лица с использованием специального щелочного раствора, введение которого осуществляется с отрицательного полюса. Облегчает удаление сальных пробок, используется для подготовки к мануальной или ультразвуковой чистке.

Методы терапевтического воздействия в косметологии

Эпиляция по методу Termolisi Flash (флэш термолиз)

Импульсы высокочастотного электрического тока в результате теплового воздействия (термокоагуляции) разрушают клетки волосяного мешочка и лишают опоры связанный с ними волос. Процедура эпиляции Flash представляет собой усовершенствованную процедуру термолиза с более мощными и короткими импульсами продолжительностью в сотые доли секунды. Этот быстрый метод рекомендуется для областей с густо растущими волосами, дает хорошие результаты даже для толстых волос. Во время одного сеанса эпиляции, может быть обработана довольно большая область.

Эпиляция по методу Electrolysis (электролиз)

Метод основан на воздействии на волосяной фолликул слабого постоянного тока, проходящего через иглу. Протекающий ток приводит к электролитическому ионному разложению воды и солей, в результате образуется гидроксид натрия (каустическая сода), разрушающий органические ткани, которые формируют корень волоса. Этот метод незаменим при обработке кожи с изогнутыми, деформированными волосными фолликулами.

Эпиляция по методу Blend (комбинированный метод термоэлектролиз)

Использует смесь токов малой интенсивности для идеального сочетания разрушительного действия электролиза с быстрым действием термолиза. Сначала высокочастотный ток достигает волосяной луковицы, нагревает ее и частично анестезирует, делая ее менее чувствительной к боли и более восприимчивой к постоянному току, который с помощью производства едкого натрия (каустической соды) уничтожает корень волоса. Комбинация термолиза и электролиза значительно ускоряет процесс разрушения корня волоса. Рекомендуется для редко растущих толстых волос под подбородком и на белой линии живота, а также для трудноудаляемых, «упрямых» волос с извитым волосным ходом.

Эпиляция по методу Super Flash (вариация флэш термолиза)

Оборудование последнего поколения способно генерировать импульсы, длительность которых составляет всего несколько тысячных долей секунды и разработано для увеличения эффективности и безболезненности процедуры термолиза на больших и чувствительных областях.

Эпиляция по методу Super Flash 3 (вариация флэш термолиза)

Аппарат автоматически генерирует три очень быстрых и мощных разряда высокоинтенсивного электрического тока длительностью в несколько тысячных долей секунды. Такой режим подачи импульсов удобен в работе и повышает эффективность эпиляции, не создавая ощущения дискомфорта у клиента.

Эпиляция по методу Epilsoft (трихоатрофический эффект)

Используя специальный излучатель, высокочастотный электромагнитный импульс достигает корня волоса и вызывает его постепенную атрофию. Волос истончается и постепенно перестает расти. Процедура проводится по гелю, богатому экстрактами для замедления роста волос. Данный гель служит проводником и облегчает проникновение тока. Обработанные волосы затем удаляются традиционным восковым методом. Отлично подходит для тонких волос, покрывающих большую область.

Эпиляция по методу Tweezer/Pinza (пинцет)

Этот метод основан на действии высокочастотного электрического тока, протекающего от пинцета через зажатый браншами пинцета волосок к волосяной луковице и к волосяному сосочку. Локальный нагрев электрическим током высокой частоты повреждает и разрушает клетки волосяного мешочка, после чего волос легко удаляется тем же пинцетом. Процедура не использует иглы, безболезненна и не вызывает дискомфорта, но очень длительна по сравнению с другими методами. Рекомендуется для труднодоступных волос и чрезвычайно чувствительных областей.

Метод Derm (подготовка к эпиляции и уход после эпиляции)

Анафореz – для проникновения в кожу биологически активных веществ, анестезирующих препаратов или веществ замедляющих рост волос (отрицательно заряженных).

Катафореz - для снятия отечности и гиперемии после эпиляции, для увлажнения тканей в обработанных областях.



Stormoff[®]

info@stormoff.com

www.stormoff.ru

+7 (495) 956-05-57

+7 (495) 780-07-90